




SCHEDA TECNICA

GEL ANTIUSTIONI CODICE PRE002 E GARZE ANTIUSIONI CODICE GAZ101

- **COMPOSIZIONE DELL' IDROGEL**
Acqua purificata, glicerina, crosspolimero acrilato, EDTA disodico, trietanolamina
- **STERILITA'**
Irraggiamento con raggi gamma
- **DATA DI SCADENZA**
5 anni
- **PH IDROGEL**
5,5 -7,0
- **BIODEGRADABILITA' IDROGEL**
100%
- **ASPETTO DELL'IDROGEL**
Liquido, trasparente
- **ODORE IDROGEL**
Senza odore
- **COMPOSIZIONE SUPPORTO GARZE**
Schiuma poliuretana con struttura a cellule aperte incatenate.

PVS SpA

20060 CASSINA DE PECCHI (MI)
Via Leonardo da Vinci, 18

 +39 029160011
 +39 0291600310
 +39 0291600149

Email: info@pvs-spa.it Web: www.pvs-spa.it

cod.fiscale part.IVA/VAT IT 06532250153
cap.soc. Euro 619.748,28 i.v.
Reg.imprese MI n. 215184
R.E.A. MI n. 1103165

SISTEMI E PRODOTTI PER IL PRONTO SOCCORSO E LA RIANIMAZIONE

- **ATTENZIONE:**
 - ✓ Non strofinare il gel sull'area interessata.
 - ✓ Non riutilizzare.
 - ✓ Solo per uso esterno.
 - ✓ Se compaiono irritazioni, smettere l'utilizzo.
 - ✓ Conservare in un luogo fresco.
 - ✓ Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata.




- **CARATTERISTICHE E BENEFICI**
 - ✓ Non aderisce all'area bruciata
 - ✓ Non è tossico.
 - ✓ Promuove la guarigione, inumidisce, raffredda e lenisce.

- **MODALITA' D'USO:**
 - ✓ Aprire la bustina o rimuovere la medicazione.
 - ✓ Applicare il gel o la garza sulla zona interessata. Non strofinare.
 - ✓ Coprire se necessario.
 - ✓ Se il dolore persiste contattare un medico

- **CONFEZIONI**
 - PRE002: bustine da 3.5g
 - GAZ101: garze da 10 x 10 cm

PVS SpA

20060 CASSINA DE PECCHI (MI)
Via Leonardo da Vinci,18

 +39 029160011
 +39 0291600310
 +39 0291600149

Email: info@pvs-spa.it Web: www.pvs-spa.it

cod.fiscale part.IVA/VAT IT 06532250153
cap.soc. Euro 619.748,28 i.v.
Reg.imprese MI n. 215184
R.E.A. MI n. 1103165